

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 6月 30日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300041
作業年月日	2017年 6月 30日		作業時間	: Hr
顧客名	野木病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1		電話番号	: 078-947-7272
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 7月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 6/4(水)より6/20(火)までE401排水流量が計5回発生。6/29(木)より6/30(金)までE401排水異常E402排水異常が計5回発生。

不具合原因、作業内容
 排水フィルタ-新型の目詰まりが原因です。小林師長様と相談の上、専用排水口を流して、排水フィルタ-新型のみ撤去。

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 382
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
プログラムVer	正常	☒	0204 / T02.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 保守部品交換。排水フィルタ-新型のみ撤去後、正常作動したので終了。*排水フィルタ-の設置。

装置情報	交換後運転回数: 582 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 323 回	消毒+7L: 2426 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 782 回	7Lアルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0081 → NO.10070347
排水フィルター(新型)	撤去	☐	1個	オゾンセンサー NO.111207-034 NO.130719-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 6 月 30 日

ご署名 小林 英理子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山