

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 9月 8日

|       |                                          |                                                                       |                              |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                                                                       | 製造番号                         | : 300355                                      |
| 作業年月日 | 2017年 9月 8日                              |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                          |
| 顧客名   | 中本クリニック 御中                               |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県神戸市西区桜が丘中町2丁目1-5                      |                                                                       | 電話番号                         | : 078-994-6020                                |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                          | 様                                             |
| 納入年月日 | 2014年 9月 2日                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 3回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |                                        |              |                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |              |                                                     |
|                           |                                        |              |                                                     |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |              |                                                     |
|                           |                                        |              |                                                     |
| 点検項目                      |                                        |              |                                                     |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 676     |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm  |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                           |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0204 / T02BV |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |              |                                                     |
|                           |                                        |              |                                                     |

|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 189 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 3 回      | 消毒+アル: 521 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 502 回    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                         |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 12091180 → NO. 13031335  |
| 排水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO. 140528-007 NO. 131107-007 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、         |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし            |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                      |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                             |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。 |  |
| 2017年 9 月 8 日<br>ご署名 中本博士                                             |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |