

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 7月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300747	
作業年月日	2017年 7月 13日		作業時間	:	Hr
顧客名	野口医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市城東区関目3丁目13-1		電話番号	:	06-6931-7821
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2016年 1月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・7/8（土）から7/13（木）まで『E:111 排水注意』が計11回発生。

不具合原因、作業内容

・排水フィルターの目詰りが原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 393
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207/T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・専用床下排水口のため、排水フィルターのみ撤去し、正常作動したので終了。

※排水フィルター容器はそのまま設置。

装置 情報	交換後運転回数：	588回	更新（リセット）実施・ 未実施	消毒：	628回	消毒＋アル：	884回
	リークチェック：	0回	自己洗浄：	8回	アルコール単独：	2回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山