

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 7月 18日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1795
作業年月日	2017年 7月 18日		作業時間	: Hr
顧客名	中村クリニック外科・胃腸科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	明石市大久保町ゆりのき通1-4-2オースタウンエスタ17番館102		電話番号	: 078-938-0477
販売店			ご担当	様
納入年月日	2009年 4月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	総運転回数: 4,622 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	交換後運転回数: 1,204 回
酸素発生	濃度: 92.4 %	流量: 0.81 L/min	圧力: 101 ~ 183 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒 NO. SPS-11730 → NO. SPS-12129 オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
ドレン用フィルタ		☒	一式	
吸着筒		☒	一個	
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄			29 年 7 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。			
ご署名			PT7 〇

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山