

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-24116

No. 171003

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	佐々木クリニック 様			機番	100475
環営	所在地	滋賀県長浜市小堀町80-1			納入日	平成24年5月29日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成29年7月6日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成29年10月3日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記のとおりご報告いたします。

[1] 点検結果

不具合現象を確認いたしました。分解点検したところ、直流電源の出力側の電圧が不安定な状態でした。

この部品を交換して復旧しましたが、念のためにこの電源に関連する部品を交換致しました。

写真1：交換部品一式

直流電源



[2] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：運転情報・・・交換後運転回数：32 殺菌：243 殺菌+アルコール：1318
リークチェック：3 自己洗浄：1133 アル単独：2 エア単独：2

承認



審査



作成

H29. 10. 3
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	直流電源	1 個	
	コントロール基板	1 枚	052131-0892→050871-0973
	タッチパネル	1 式	C 045632→C 042917

（株）IHI アグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528