

保守点検・修理 報告書

管理 No.

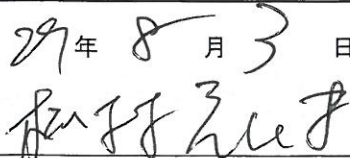
発行日 2017年 8月 3日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300606
作業年月日	2017年 8月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	まつむらクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市鶴見区横堤1-12-17		電話番号	: 06-6914-1199
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 8月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 418
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0207 / T62C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 140 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 4 回	消毒+アル: 317 回
	リークチェック: 98 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10010106 → NO.13051394
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140617-002 → NO.130807-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	2017年 8月 3日 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山