

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 10月 17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300683
作業年月日	2017年 10月 17日		作業時間	: Hr
顧客名	やまぐち医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区岩倉忠在地町541		電話番号	: 075-701-1104
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2015年 10月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 340 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0207 / T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 226 回	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒: 123 回	消毒+アル: 322 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12111236 → NO. 13021319
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 150223-019 → NO. 121002-015
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 中山 隆弘

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山