

平松医院 御中

# 点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業(株)岡田

|       |             |      |        |      |              |
|-------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 点検年月日 | H.29年 8月 3日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 1592         |
| 設置場所  | 内視鏡室        |      |        | TEL  | 06-6721-0268 |
| 納入時期  | H.20年 6月 5日 | 使用回数 |        | 御対応者 |              |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                            |                          |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                            |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                            |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                            |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                            |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.5ppm mg/L                            |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 95.5 % 流量: 0.82 L/min 圧力: 119 ~ 222 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                            |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                            |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量 | コメント                      |
|----------|----|---------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | 交換前 44% → 交換後 95.5%<br>良好 |
| 吸湿筒      | 一式 |                           |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                           |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                           |

29年 8月 3日

ご署名

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。