

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 03-23961 No. 170703

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	三好内科 様	機番	100550
環営	所在地	大阪府池田市呉服町3-9	納入日	平成24年9月4日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成29年6月2日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成29年6月27日

修理依頼・不具合内容

殺菌水槽の底手前中心部より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

平成28年6月に溶接修理した部分から水が漏れることを確認しました。この部分と周囲を再度溶接して復旧いたしました。

この水槽につきまして、写真1の通り上部側に損傷箇所があります。次回の修理時は水槽全体の交換をご検討くださいますようお願い致します。

写真1：水漏れ箇所


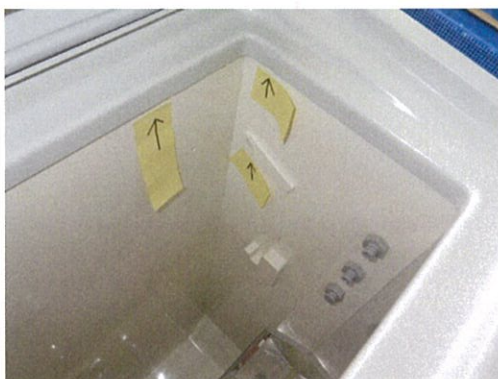


写真2：水漏れ箇所

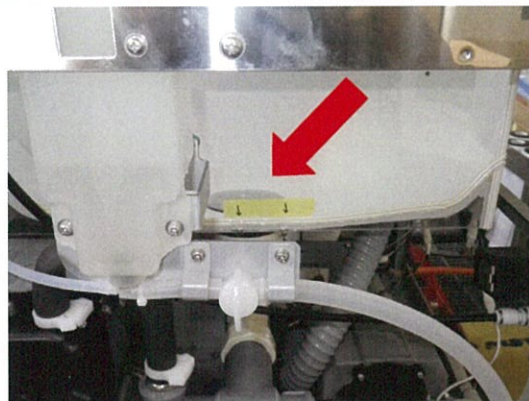

[2] 作業内容

- 1：水槽の漏れ確認：水を張った状態で3日間実施・・・水漏れなし
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.67ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

[3] 装置情報

交換後運転回数：2213 殺菌：8851、殺菌+アルコール：4572、リークチェック：12972
自己洗浄：1017、アルコール単独：302、エア単独：1

交換部品

承認
安 17.7.3 田
審査
中 17.7.3 澤
作成
H29.7.3 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	カラータッチパネル	1	予防保全のため

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528