

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 8月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100550
作業年月日	2017年 8月 29日		作業時間	: Hr
顧客名	三好内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府池田市呉服町3-9 サンロイヤル池田駅前1階		電話番号	: 072-752-2936
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 9月 4日	保証期間	内口 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 497
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T03D
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：	2214回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌：	8852回	殺菌＋アル：	4572回
	リークチェック：	12972回	自己洗浄：	1017回	アルコール単独：	302回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13031345 → NO. 12051046
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140227-003 → NO. 170215-002
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ 新型	(ブルー)	☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	29 年 8 月 29 日 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山