

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 9月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100185
作業年月日	2017年9月15日		作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2790番地		電話番号	: 0743-92-0030
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 2月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容 新田Drからの紹介(元京大HP)の 下北山村(診)大谷エム・
浄化槽のバクテリアの対策(環境問題)に 吉村Dr. → Arp値がとれていなら
→ 大腸菌とE. coli、大量の水で洗って カサクサにセメントとかで? 1ヶ月水を空気にさらす。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 468
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 01.07 TOL.A

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 76 回	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 36 回	殺菌+アル: 301 回
	リークチェック: 431 回	自己洗浄: 258 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13051403 → NO. 15072058
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130516-024 → NO. 150122-007
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
バクテリア		☒		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H29 年 9 月 15 日

ご署名

YTF

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田