

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 10月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100450
作業年月日	2017年 10月 5日		作業時間	: Hr
顧客名	おいそ内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目10番13号 1階		電話番号	: 06-6711-0701
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 3月 14日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが作動しない。

不具合原因、作業内容

タッチパネルの不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 286
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / 103D / 101-A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルをカータッチパネルに交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数:	0 回	更新（リセット）実施・未実施	未実施	殺菌:	13 回	殺菌+アル:	9177 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	966 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:	0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネルS/N:087374H0447→S/N:12424C0X565

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

大塚 隆夫

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山