

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 O E D - 1 0 0 0 S			製造番号	: 300471
作業年月日	2018年 1月 18日			作業時間	:

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 365 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0205 / 7020
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 652 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 7 回	消毒+アル: 311 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 298 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12101196 → NO. 12020894
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. K40576-004 → NO. 120508-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ 新タイプ	711-	☒	1個	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 安岡 純江 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山