

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300491
作業年月日	2018年 1月 17日		作業時間	: Hr
顧客名	JOH & PARTNERS UMEDA CLINIC 様		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市北区曽根崎新町1-4-20桜橋IMビル2階		電話番号	: 06-6147-8136
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 3月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

「E:210 光量低下異常」5回、「E:212 リーク切れ異常」5回、「E:107 センサ-異常」5回、
「E:105 センサ-異常」16回、発生

不具合原因、作業内容

定期交換部品セット、コントロール基板の不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 350
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 0207
			プログラムVer	正常	☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

部品交換し、正常作動したのを終了。

装置 情報	交換後運転回数: 207 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 6 回	消毒+アル: 201 回
	リークチェック: 188 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13091548 → NO.12061015
排水フィルター	無償	☒	1個	オゾンセンサー NO.131102-032 → NO.130807-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	
コントロール基板	無償	☒	1枚	コントロール基板 No.1203310972 → No.1203410973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 1月 17日

ご署名 田中 中

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山