

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 2月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300344
作業年月日	2018年 2月 2日		作業時間	: Hr
顧客名	堀井医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府茨木市舟木町5番26号		電話番号	: 0726-32-2233
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 7月 28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/31(水)より 2/1(金)迄 「E-111 排水注意」 が計14回発生。

不具合原因、作業内容

排水フィルターの目詰まりが原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 27/
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ D204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルターの目詰まりを撤去し正常作動したのを終了。

装置 情報	交換後運転回数：929 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：250 / 回	消毒＋アル：3389 回
	リークチェック：0 回	自己洗浄：170 回	アルコール単独：0 回	エア単独：0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター	(新型)	☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター	(中空糸)	☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 2月 2日

ご署名

堀井 啓

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山