

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300039
作業年月日	2018年 1月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	曲直部クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市中央区伏見町2-5-7岡田伏見町ビル2階		電話番号	: 06-6226-4080
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2013年 6月 26日	保証期間 内 ☒ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・1/11 (木) 『E: 210 光量低下異常1』 『E: 212 ランプ切れ異常』が、計3回ずつ発生。			
不具合原因、作業内容			
・定期交換部品セットの不具合が原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 491
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・定期交換部品セットを交換し、正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 1932回	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒: 24回	消毒+アル: 1908回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 231回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO, 12061094 → NO, 10100444
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, 120711-024 → NO, 120508-011
排水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	
バリスタ		☒	1本	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2018年 1月 31日 ご署名 柳 美沙子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山