

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 10月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100663
作業年月日	2017年 10月 27日		作業時間	: Hr
顧客名	井口医院		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市西京区桂徳大寺南町7		電話番号	: 075-381-5541
販売店	佐野器械(株)		ご担当	佐藤 様
納入年月日	2013年 4月 4日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
マニホールド 周辺 チューブの交換。	
点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 450
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
プログラムVer	正常 ☒ 0107 / Tol.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 292 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1323 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 975 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
マニホールド 周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
2017年 10月 27日	
ご署名 井口 公雄	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井