

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 2月 16日

|       |                               |                                                                       |                              |                                               |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000           |                                                                       | 製造番号                         | : 100572                                      |
| 作業年月日 | 2018年 2月 16日                  |                                                                       | 作業時間                         | : 1.5 Hr                                      |
| 顧客名   | 奈良市立都祁診療所 御中                  |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 奈良県奈良市都祁白石町1084               |                                                                       | 電話番号                         | : 0743-82-1411                                |
| 販売店   |                               |                                                                       | ご担当                          | 様                                             |
| 納入年月日 | 2013年 2月 8日                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/>                              | 5回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                      |
|----------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 388      |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm   |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
|          |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0107 TOKC |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

S/N 0873744016535 → S/N 124824C048950

|          |                |                |              |            |
|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 316 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 1744 回   | 殺菌+アル: 0 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 480 回    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                            |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 11020590 → NO. 10150187     |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 120508-009 → NO. 157001-006 |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| タッチパネル       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | 給水フィルターの5点は製造番号なし                       |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      | タッチパネル NO. → NO.                        |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 2 月 16 日

ご署名

小橋

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 柏田  |