

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 2月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100110
作業年月日	2018年 2月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	明海病院 御中		電話番号	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市藤江201		ご担当	: 078-922-8800
販売店			ご担当	様
納入年月日	2010年 9月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/15(木) E:205 オバ70-異常 計6回、E:214 マニホールド異常 計3回発生。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板の不具合が原因です。水位センサ HH・N₂なし→N₂AE76(2.16)
H・N₂なし→N₂AE71(2.04)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 173
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107 / TOL/A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・コントロール基板を交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 143 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 428 回	殺菌+7L: 217.5 回
	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 1513 回	7Lアルコール単独: 80 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
コントロール基板		☒	1枚	給水フィルターの5点は製造番号なし
水位センサ	HH、H	☒	各1個	コントロール基板 No. 0817510892 → No. 1119510973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 出井

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山