

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100765
作業年月日	2018年 1月 19日		作業時間	: Hr
顧客名	楽只診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市北区紫野上御奥町23-1		電話番号	: 075-491-0232
販売店	佐野器械株式会社 御中		ご担当	田城 様
納入年月日	2013年 6月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
タッチパネルに触れても反応しない。1/15代替器入替			
不具合原因、作業内容			
タッチパネル・コントロール基盤交換。			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		プログラムVer	正常 ☐ /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：	回	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌：	回	殺菌＋アル：	回
	リークチェック：	回	自己洗浄：	回	アルコール単独：	回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	
タッチパネル		☐	1個	タッチパネル : 087374H023661⇒124824C045672
コントロール基盤		☐	1個	コントロール基盤 : 0501210892 ⇒1016510973

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 _____				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井