

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300489
作業年月日	2017年 11月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	森田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県加古川市西神吉町岸152-9		電話番号	: 079-432-8556
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 3月 10日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/26(土)に「E:105 ヒター異常」50回、「E:106 水温センサ異常」63回、「E:107 ヒターセンサ異常」64回、11/5(木)まで発生。

不具合原因、作業内容

ヒーター、コントロール基板の不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 481
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.171 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ヒーター、コントロール基板を交換し、正常作動したのを終了。

装置情報	交換後運転回数: 146 回	更新(リセット)実施: 未実施	消毒: 458 回	消毒+アル: 103 回
	リークチェック: 192 回	自己洗浄: 89 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	タイマー/N: 124824C005997 → 8/N: 124824C015865
タイマー		☒	1個	コントロール基板 N: 120370972 → N: 1015510913

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

森田 潔

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山