

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月 21日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300409       |
| 作業年月日 | 2017年 11月 21日                                                                          |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 高橋クリニック 御中                                                                             |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町菅ノ口707-1                                                                  |                                                                       | 電話番号 | : 078-751-8080 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 2014年 11月 13日                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 347    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0205 / T02C |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |                |                                                                              |              |              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 348 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 9 回      | 消毒+アル: 540 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 476 回                                                                  | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                          |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.11030606 → NO.12061095     |
| 排水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO.130529-008 → NO.121101-016 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、          |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし             |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                       |

|                                                                                                                            |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  |  | 29 年 11 月 21 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  | ご署名 平本美奈       |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |