

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月22日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300146
作業年月日	2017年 11月22日		作業時間	: / Hr
顧客名	矢野医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町調月769-100		電話番号	: 0736-66-2609
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 11月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 814
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver0207 TD2BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 8 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 113 回	消毒+アル: 38 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11030610 → NO. 17092850
排水フィルター（新型）		☒	1個	オゾンセンサー NO. 120516-009 → NO. 151203-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
29 年 11 月 22 日 和歌山県紀の川市桃山町調月769-100 矢野医院 ご署名 矢野 正 責任技術者 不作業者 電話 0736-66-2609	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	不作業者
柏田	