

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 12月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100569
作業年月日	2017年 12月 8日		作業時間	: Hr
顧客名	山田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区王子町2-12-14		電話番号	: 06-6622-3166
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 11月 12日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/8(水)、12/6(水)、E:401 排水異常し、各1回ずつ発生。水槽内に約120mm

不具合原因、作業内容

排水ポンプに繊維やゴミが混入し、一時的に動きが悪くなったと思われました。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 564
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0/07 / TOLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

しばらく様子を見て様子になりました。

装置情報	交換後運転回数: 145 回	更新(リセット)実施: 未実施	殺菌: 137 回	殺菌+アル: 171 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 162 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
バリスタ		☐	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山