

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 21日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300153
作業年月日	2018年 12月 21日		作業時間	: Hr
顧客名	岡林医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区西洞院通松原下ル永倉町555-4		電話番号	: 075-341-0393
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 1月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 562
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数:	258回	更新（リセット） <u>実施</u>	未実施	消毒:	200回	消毒+アル:	578回
	リークチェック:	0回	自己洗浄:	408回	アルコール単独:	2回	エア単独:	0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13091533 → NO. 13081488
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140623-012 → NO.130619-008
排水フィルター		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル（無償）		☒	1個	タッチパネル S/N: 087374H027299 → S/N: 124824C046530

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

129 年 12月 25 日

署名 岡林秀興

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山