

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 4月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100219
作業年月日	2018年 4月 5日		作業時間	: Hr
顧客名	河島医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-1-24		電話番号	: 06-6629-2110
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 4月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 534
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / TAD

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 368 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 14 回	殺菌+アル: 2870 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1794 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10100456 → NO. 15112193
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 131023-012 → NO. 140804-011
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H011276 → S/N: 124824C047663

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

清水

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山