

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 4月11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300559
作業年月日	2018年 4月 11日		作業時間	: / Hr
顧客名	くしもと町立病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7		電話番号	: 0735-62-7111
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 4月 24日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 409
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ Ver 2.05 / TOIC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保管庫：あり。 CV-290, アルコール交換済。
CF-HF2901, CF-Q260A1, PCF-Q260A2, JF-260V, GIF-XP260N, GIF-XP260, GIF-H290

装置情報	交換後運転回数：832 回	更新（リセット） ☒ 未実施	消毒：1082 回	消毒+アル：1455 回
	リークチェック：1433 回	自己洗浄：423 回	アルコール単独：19 回	エア単独：27 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13091537 → NO. 14081872
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 141104-005 → NO. 141104-004
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 4月 11日

ご署名 橋本 美和

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田