

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100053
作業年月日	2018年 1月 29日		作業時間	: Hr
顧客名	岡村医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町19-1		電話番号	: 075-751-1981
販売店			ご担当	様
納入年月日	2010年 6月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 604 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0/07 / To/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 46 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌: 24 回	殺菌+アル: 265 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 44 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.11030607 → NO.13121622
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140805-005 → NO.120828-014
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
平成 30 年 1 月 29 日 ご署名 岡村 芳郎	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山