

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 2月 2日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300013       |
| 作業年月日 | 2018年 2月 2日                                                                            |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | ひきまクリニック 御中                                                                            |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府羽曳野市栄町4-10パレフラックス2階                                                                 |                                                                       | 電話番号 | : 0729-50-4880 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 2013年 2月 5日                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                 |                                                             |
|                                                 |                                                             |
| 不具合原因、作業内容                                      |                                                             |
|                                                 |                                                             |
| 点検項目                                            |                                                             |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 391   |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm    |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>         |
|                                                 | プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0202 / T2.8 |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                       |                                                             |
|                                                 |                                                             |

|          |                |                                                     |              |              |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 114 回 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 361 回    | 消毒+アル: 308 回 |
|          | リークチェック: 2 回   | 自己洗浄: 110 回                                         | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                          |
|---------------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 定期交換部品セット     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.10058208 → NO.10070338     |
| 排水フィルター       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO.140829-006 → NO.140219-020 |
| 給水フィルター       |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、          |
| マニホールド 周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし             |
|               |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                       |

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                            |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |
| 年 月 日<br>ご署名 尾市                                                      |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |