

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 2月2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300011
作業年月日	2018年 2月2日		作業時間	: 3 Hr
顧客名	南クリニック胃腸肛門科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県橋本市市脇4-7-6		電話番号	: 0736-34-0171
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 2/3
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ Ver 2.07 / TDC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

7.7.10.15.18 0873744025323 → 5/124824C048904
 洗濯板なし、床下排水、専用給水用蛇口。

装置情報	交換後運転回数: 1173 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 3633 回	消毒+7L: 2602 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 1028 回	7Lアルコール単独: 15 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13071454 → NO. 12081141
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130626-010 → NO. 120801022
給水フィルター	(中空糸)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ	(活性炭)	☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル交換		☒		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1130 年 2月2 日

ご署名 J.M. 123

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田