

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_

発行日

2018年 6月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100223
作業年月日	2018年 6月 4日		作業時間	: _____ Hr
顧客名	大間知クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10		電話番号	: 06-6618-1000
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 5月 12日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>		
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> ハル数 351
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
			プログラムVer	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 0107 / T01A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 260 回	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌: 997 回	殺菌+アル: 1889 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1240 回	アルコール単独: 41 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14101942 → NO. 13101550
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO. 130618-019 → NO. 130730-007
マニホールド周辺チューブ		<input type="checkbox"/>	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 6月 4日

ご署名 山崎 由希

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山