

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 6月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0			製造番号	: 100472
作業年月日	2018年 6月 12日			作業時間	: Hr
顧客名	たなか内科クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市甲子園浦風町2-1			電話番号	: 0798-42-7702
販売店				ご担当	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 294
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / T03D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 290 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 10 回	殺菌+7L: 1452 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12061078 → NO. 11080771
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 14126-001 → NO. 131203-004
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッパパネ		☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
アルコールセット	新製フィル	☒	1個	741PRL/S/N: 087374H014564 → S/N: 12424046558

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

田中 浩 氏

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山