

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 6月 13日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |     |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300660                                      |     |
| 作業年月日 | 2018年 6月 13日                             |                               | 作業時間                                                             | : 3 Hr                                        |     |
| 顧客名   | 和歌山生協病院 御中                               |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |     |
| 所在地   | 和歌山県和歌山市有本143-1                          |                               | 電話番号                                                             | : 073-471-7711                                |     |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |     |
| 納入年月日 | 2015年 10月 16日                            | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |                                               | 付属品 |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 3回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |     |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/21 ~ 排水注意 (E-111) , 排水に時間がかかること。

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                    |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 519    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0207 / T02C |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

EG-530NW, EG-3000PP, JF 260V, GTF2602, CLV260, ジャステ  
プロコの内視鏡あり、6本外保管

|          |                 |                  |                 |               |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1503 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 3092 回      | 消毒+7L: 1770 回 |
|          | リークチェック: 1310 回 | 自己洗浄: 898 回      | 7Lアルコール単独: 19 回 | エア単独: 5 回     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 16062372 → NO. 16052339                   |
| 排水フィルター(新型)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. 141118-003 → NO. 140219-013               |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット |                                                       |
| 排水ホース        |       | <input checked="" type="checkbox"/> |      |                                                       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 6 月 13 日

竹野 華菜

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |