

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 3月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300010
作業年月日	2018年 3月 9日		作業時間	: Hr
顧客名	多可赤十字病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県多可郡多可町中区岸上280		電話番号	: 0795-32-1223
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 3月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

※ 校検分新品の排水フィルターは、排水フィルター容器付近に明記して保管。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 361
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

※ 前回の保守より今回の保守にて排水異常が発生したが、ため排水フィルターは1本のみ交換。

装置情報	交換後運転回数: 636 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 765 回	消毒+アル: 1597 回
	リークチェック: 1212 回	自己洗浄: 550 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14011871 → NO. 12051013
排水フィルター (新型)	1本の4.	☒	2個	オゾンセンサー NO. 141021-013 → NO. 120904-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル NO. 088374H028779 → NO. 124824C046696

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 3月 9日

ご署名

永尾 剛

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山