

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 3月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300257
作業年月日	2018年 3月 12日		作業時間	: Hr
顧客名	北住医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20ア-ス アーク親月橋 1 階		電話番号	: 075-612-5217
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 3月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒

バルブ数 473

履歴 0.72 ppm

0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 202 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 10 回	消毒+アル: 730 回
	リークチェック: 737 回	自己洗浄: 630 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12101192 → NO. 11070688
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 140514-006 → NO. 10110-005
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 30 年 3 月 12 日

北住医院 北住清治
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山