

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 7月 2日

|       |                                          |                                                                       |                              |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                                                                       | 製造番号                         | : 300346                                      |
| 作業年月日 | 2018年 7月 2日                              |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                          |
| 顧客名   | そうわ内科クリニック 御中                            |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 大阪府大阪市浪速区浪速東3-9-24                       |                                                                       | 電話番号                         | : 06-6626-9939                                |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                          | 様                                             |
| 納入年月日 | 2014年 7月 28日                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 4回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
| 不具合原因、作業内容                                      |                                                              |
|                                                 |                                                              |
| 点検項目                                            |                                                              |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 5/1    |
| オゾンセンサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm     |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
|                                                 | プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0204 / T02BV |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                       |                                                              |
|                                                 |                                                              |

|          |                |                                                                              |              |              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 357 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 85 回     | 消毒+アル: 867 回 |
|          | リークチェック: 1 回   | 自己洗浄: 1 回                                                                    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                            |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 150/2024 → NO. 1211/228     |
| 排水フィルター      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. 181020-005 → NO. 141014-009 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし               |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                         |

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |
| <div style="text-align: right;"> H30 年 7 月 2 日<br/> ご署名 宇田 創 </div>                                                         |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |