

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 3月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300490
作業年月日	2018年 3月 20日		作業時間	: Hr
顧客名	天神橋みやたけクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市北区天神橋3-2-13 大阪写真館ビル2階		電話番号	: 06-6809-7295
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 3月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	バルブ数 439
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	履歴 0.70 ppm
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	
排水栓、排水ライン	正常	☒	0.205 / T02C
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	0.205 / T02C
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
プログラムVer	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 453 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 91 回	消毒+7ル: 754 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	7ル単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12061098 → NO.14051778
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.160202-004 → NO.140526-014
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 宮竹 英希

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山