

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 7月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300331
作業年月日	2018年 7月 27日		作業時間	: 4 Hr
顧客名	さくらクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高140-1		電話番号	: 073-484-5001
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 7月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/20 排水注意 E:111
10/21 酸素圧力異常 E:200

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 551
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver 0204 / T02BV

0204 / T04C

装置 情報	交換後運転回数: 556 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 177 / 回	消毒+アル: 209 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14111958 → NO.18033105
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.141121-009 → NO.131126-022
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル S/N:0873744029342 → S/N:124424048842

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 7月 27日

ご署名

山下 裕子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田