

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-25796

No. 180731

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	大阪府堺市北区長曽根町1467-1		機番	000891
ユーザー名	江本クリニック 様		納入日	
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年06月13日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成30年07月31日

修理依頼・不具合内容

オーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

性能低下した部品を交換しました。

写真1：No. 1 定期交換部品セット



写真2：No. 2～10 センサー、ポンプ、チューブほか



[2] 修理・点検内容

1. 分解点検、部品取付、運転検査および清掃作業
2. オゾン水濃度測定：0.33～0.49mg/L・・・正常（水温30℃）
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.7 % 酸素流量：0.81 L/min 圧力：0.116～0.189 MPa（AC100V 60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ・・・2764

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品セット	1 式	SPS-11550→SPS-12234
2	水位レベルセンサー	3 本	
5	配管チューブ、パッキン	1 式	タッチシート含む
4～6	水ポンプ	3 台	P-1、P-2、P-3
7	オゾンセンサー	1 個	
8	エアコンプレッサー	1 個	
9～10	給水電磁弁、排水バルブ	1 式	駆動用抵抗含む

（株）IHI アグリテック（旧社名 I H I シバウラ）

承認



審査



作成

H30. 7. 31
中澤