

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 8月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300025	
作業年月日	2018年 8月 3日		作業時間	:	Hr
顧客名	太田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県明石市二見町西二見89-7 兵庫二見ビル2階		電話番号	:	078-949-0388
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2013年 5月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルを触っていないのに電源が入り起動する。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの不具合が原因です。念のためコントロール基板も交換。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 385
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / To4C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネル、コントロール基板を交換し 正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 58 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施	消毒: 10 回	消毒+アル: 1508 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1262 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター（新型）		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
コントロール基板		☒	1枚	タッチパネル S/N: 087374H025332 → S/N: 124P24C05/354

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

コントロール基板 No. 0808210970 → No. 0522710973

2018年 8月 3日

ご署名

太田 昌資

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山