

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 10日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1252	
作業年月日	2017年 4月 10日		作業時間	: 2	Hr
顧客名	樋上病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県橿原市葛本町701		電話番号	: 0744-23-1185	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2006年 9月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7回目	定期点検ソール記入	☒
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ミニツク MMC-1400WDX【0906667】

7ミ EG-580NW2 x 2本 , アドバニシ XL-4450 P2-0 , VP-4450HD P5-0

装置情報	総運転回数: 1,592 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	交換後運転回数: 138 回
酸素発生	濃度: 95.2 %	流量: 0.81 L/min	圧力: 101 ~ 194 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 4月 10日

ご署名 浜 美穂子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田