

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 4月 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301040
作業年月日	2018年 4月/3日		作業時間	: / Hr
顧客名	天川村国民健康保険直営診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県吉野郡天川村南日裏200番地		電話番号	: 0747-63-9110
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 12月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 438
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 ミニク 通り

7ミ EG-580NW2, Advancia XL-4450 PI-0 VP-3500HD PI-0
ミニク W-II (1511044), 床下排水, ユニタス YS-A-C001, 15ミ管径があるが使用していない

装置情報	交換後運転回数: 26 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 6 回	消毒+アル: 21 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 21 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.15102/65 → NO.12010859
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.15122/-001 → NO.160201-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、リレー継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 4月 13日

ご署名

奥田

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田