

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 8月 29日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1390	
作業年月日	2018年 8月 29日		作業時間	: 2.5 Hr	
顧客名	福山医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県奈良市尼辻中町11-3		電話番号	: 0742-33-5135	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2007年 7月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8回目(最後)		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
給水ホース劣化 水漏れ			

装置情報	総運転回数: 2374 回	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	交換後運転回数: 162 回
酸素発生	濃度: 94.9 %	流量: 0.81 L/min	圧力: 114 ~ 191 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 12049 → NO. 12242
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 8 月 29 日

ご署名 福山 靖子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田