

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 5月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 O E D - 1 0 0 0 S			製造番号	: 300560	
作業年月日	2018年 5月 11日			作業時間	: / Hr	
顧客名	横矢クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県有田郡広川町広1518			電話番号	: 0737-65-2333	
販売店				ご担当	様	
納入年月日	2015年 5月 8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/1 10:49 排水異常2 (E:402)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 554
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 鉗子もアゲレ
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

W-II, CV-150, GIF-Q150X, GIF-XP150N, PCF-Q150AI
(1503664)

装置 情報	交換後運転回数: 26 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 136 回	消毒+アル: / 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 12 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.11060659 → NO.16052311
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130725-032 → NO.160208-005
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 5月 11日

ご署名 松尾 美和子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田