

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 9月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300707	
作業年月日	2018年 9月 6日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	楽クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市築港3-21-2		電話番号	: 073-433-5000	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2015年 12月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

IHI の表示から先に進まない。また、先週にも ON してからシャワーが出たのに1分程で停止し、異常画面にもならず静かに選択画面にもどっていたり、残り数分のところで「停電の異常終了」になっていたとのこと。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 209
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ青に交換

コントロール 111951 基板 0973 => 052571 0973

装置 情報	交換後運転回数：	回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	回	消毒＋アル：	回
	リークチェック：	回	自己洗浄：	回	アルコール単独：	回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	124824C010611 → 124824C049865

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

タナベ

2018年 9月 6日

ご署名

藤田定則

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田