

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 5月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100570
作業年月日	2018年 5月 21日		作業時間	: Hr
顧客名	かよう内科・小児科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市旭区清水4-3-29		電話番号	: 06-6954-7776
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 1日	保証期間	内 ☒ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/19(土)「E:401 排水異常1」「E:402 排水異常2」が各1回ずつ発生。

不具合原因、作業内容

ボンプアプ部品の不具合が原因です。経年劣化、振動によるもの。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 351
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0/07 / 10/A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 41 回	更新(リセット)実施: 未実施	殺菌: 13 回	殺菌+アル: 769 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 637 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

三田 すみれ

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山