

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

No. 180518

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	山田 医院 様	機番	100569
環営	所在地	大阪府大阪市阿倍野区王子町 2-12-14	納入日	平成 24 年 11 月 12 日
環品	点検者	I H I アグリテック 中澤	受付日	平成 30 年 04 月 20 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 30 年 05 月 14 日

修理依頼・不具合内容

排水異常 1 (E:401) が時々発生する

2017 年 11/15、12/8 2018 年 1/10、1/17、4/20

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

「排水異常 1」が再現することを確認しました。
排水系統の部品で、排水栓を動かす「ポップアップ」の故障が原因でした。
これが故障すると排水栓が充分に開くことができず、排水抵抗が増大して
規定時間内に排水することができず「排水異常 1」が発生します。

この部品を交換して復旧いたしました。
また、排水配管、排水ポンプ、排水栓に異常はありませんでした。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：163 消毒：146、消毒+アルコール：180、リークチェック：0
自己洗浄：173、アルコール単独：0、エア単独：0

—以上—

承認	若井
審査	中澤
作成	H30.5.18 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	ポップアップ	1 個	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528