

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 9月 26日

| | | | | |
|-------|--|---|------|----------------|
| 販売名 | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S | | 製造番号 | : 300984 |
| 作業年月日 | 2018年 9月 26日 | | 作業時間 | : / Hr |
| 顧客名 | 辻岡医院 御中 | | ご担当 | : 院長先生 様 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市満屋88-1 | | 電話番号 | : 073-477-1868 |
| 販売店 | | | ご担当 | 様 |
| 納入年月日 | 2016年 9月 28日 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品 | |
| 作業区分 | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> | | |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

| 点検項目 | | 結果 | 備考 |
|--------------|----|-------------------------------------|-------------|
| フタロック | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 酸素ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| オゾンセンサ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 給水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 濃度計流量 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 水位センサー | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 水漏れ確認 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 清掃 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| トレー | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 殺菌槽コネクタ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 殺菌槽 LED | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| エアライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input type="checkbox"/> | バルブ数 560 |
| 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 細管送水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 排気ライン | 正常 | <input type="checkbox"/> | |
| オゾン濃度 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 0.67 ppm |
| 異常音、振動 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 電源コード | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 殺菌チューブ類 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input type="checkbox"/> | |
| プログラムVer | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0207 / TOPC |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 専用給排水, 設置場所: レットゲン室

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 176 回 | 更新(リセット)実施・未実施 | 消毒: 6 回 | 消毒+7L: 271 回 |
| | リークチェック: 0 回 | 自己洗浄: 86 回 | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回 |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品製造番号 |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|---|
| 定期交換部品セット | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10050190 → NO. 17052795 |
| 排水フィルター | | <input type="checkbox"/> | 1個 | オゾンセンサー NO. 150210-004 → NO. 141126-003 |
| 給水フィルター | | <input type="checkbox"/> | 1個 | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
| マニホールド周辺チューブ | | <input type="checkbox"/> | 1セット | |

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 9月 26日

ご署名 辻岡 隆二

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

| | |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| | 奥田 |