

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 6月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301152
作業年月日	2018年 6月 6日		作業時間	: Hr
顧客名	栗田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県淡路市志筑新島6-34		電話番号	: 0799-62-5000
販売店			ご担当	様
納入年月日	2017年 6月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 759
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207-103C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：609回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	消毒：158回	消毒＋アル：452回
	リークチェック：607回	自己洗浄：131回	アルコール単独：0回	エア単独：0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 16052313 - NO. 11070698
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 160208-007 NO. 131107-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコール消毒液 7"ル		☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒655-2152 兵庫県淡路市志筑新島6番地の34

医療法人社団 栗田医院

栗田 哲司

ご署名

TEL0799-62-5000 FAX0799-62-5002

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山