

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300491
作業年月日	2018年 10月 9日		作業時間	: Hr
顧客名	JOHメディカルクリニック 様		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市北区曽根崎新町1-4-20桜橋IMビル2階		電話番号	: 06-6147-8136
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 3月 12日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・2018/9/6(木)『E:201 光量低下異常1』、『E:212 ランプ切れ異常』が発生し、オゾン水濃度計交換時、日時データ不良の為、念のため『タッチパネル』、『コントロール基板』を交換。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 478
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T04C

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・タッチパネル、コントロール基板を交換し、正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 0 回	更新(リセット)実施: 未実施	消毒: 6 回	消毒+7L: 20/ 回
	リークチェック: 184 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル S/N: 124824C006160 → S/N: 124824C050776
コントロール基板		☒	1枚	コントロール基板 NO. 1203410973 → NO. 0116810975
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 宮本 真理子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山